



1. Программа GALAXIS Galileos Viewer НЕ работает на Windows 7 (диск тоже НЕ запустится), потому проверьте, какая версия на Вашем рабочем компьютере.

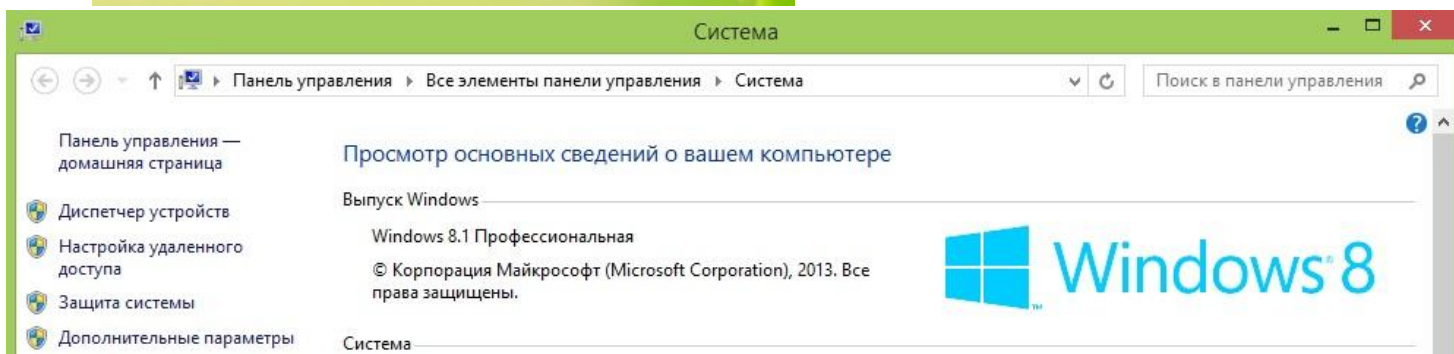

2. На нашем сайте войдите в свою папку FTP, где будут храниться КТ всех, направленных Вами, пациентов. Для этого нажмите на кнопку **ВХОД НА FTP**

Компьютерная томография

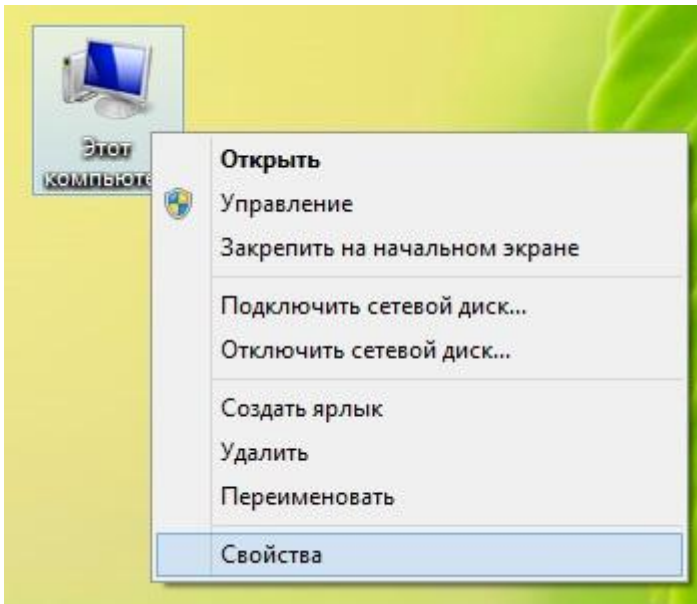

3. Для входа введите Ваш логин и пароль в соответствующие строки (для их получения свяжитесь с нами по телефону, либо укажите Ваш номер телефона в направлении пациента и мы обязательно свяжемся с Вами сами)

Необходима авторизация

Для доступа к домену ftp://194.42.195.34 необходимо указать имя пользователя и пароль.

Подключение к веб-сайту не защищено

Имя пользователя:


Пароль:

4. После правильно введенных данных вы попадете в свою папку, в которой будет список Ваших пациентов, сделавших КТ


Содержание /home


Название	Размер	Последнее изменение
[родительский каталог]		
 Purkin.rar	283 MB	05.08.16, 14:24:00

5. Выберите нужного для скачивания пациента и нажмите на его фамилию. Начнется скачивание файла на Ваш компьютер. Выберите в какую папку стоит загрузить архив.

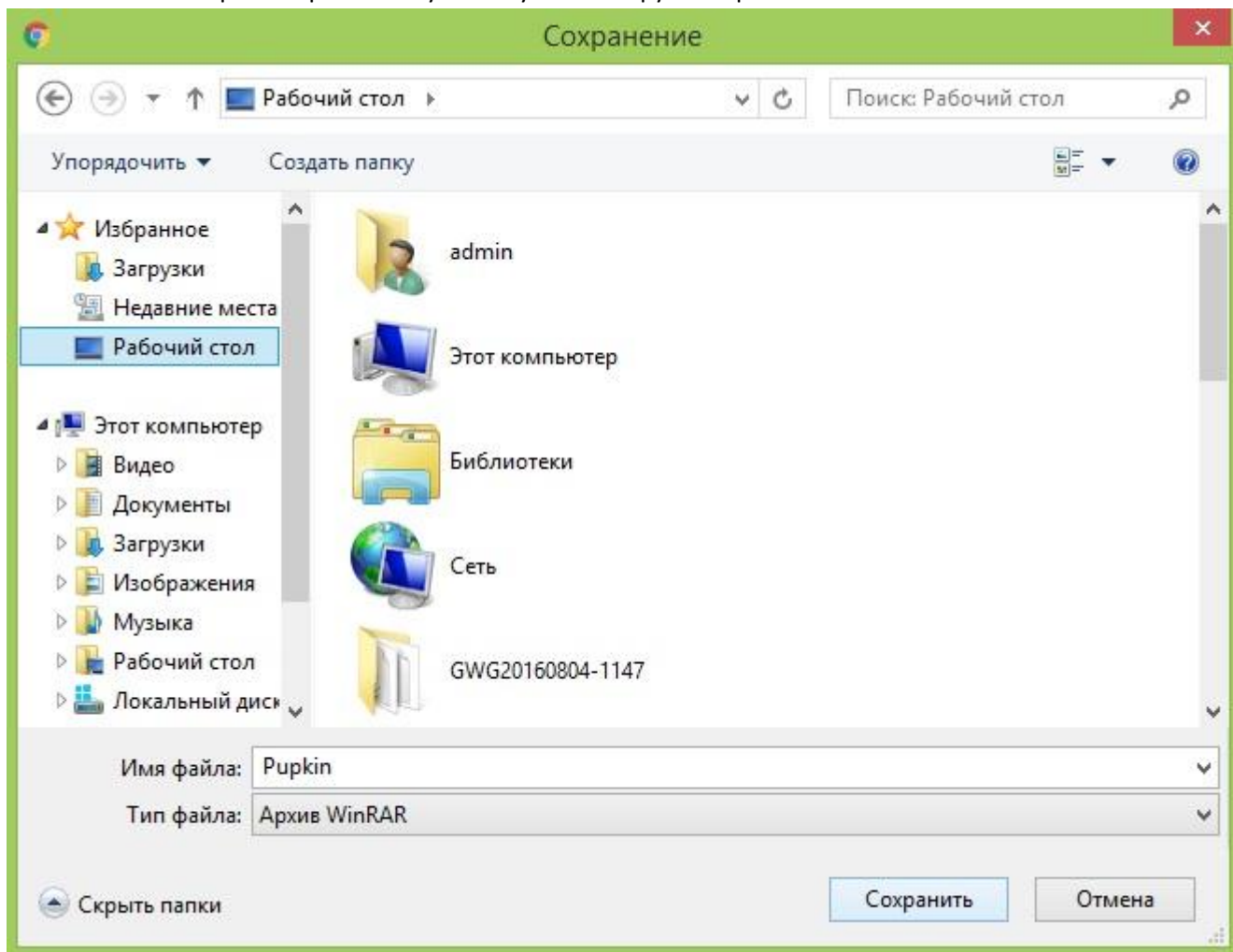

6. После окончания скачивания нажмите на архив правой кнопкой мыши и извлеките данные в папку.

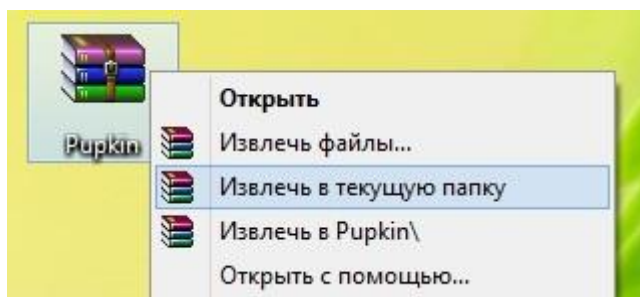

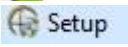7. Откройте папку, найдите приложение  Setup и нажмите на него дважды. Если версия Windows совместима с программой, то произойдет запуск программы с КТ Вашего пациента.

Средства работы с приложениями Pupkin

Файл Главная Поделиться Вид Управление

Копировать Вставить Буфер обмена Упорядочить

Переместить в Удалить Переименовать Создать папку

Свойства Открыть Выделить все Снять выделение Обратить выделение Выделить

Навигация: Pupkin

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
4700...	04.08.2016 11:49	Папка с файлами	
DotNet20	04.08.2016 11:49	Папка с файлами	
Setup	04.08.2016 11:49	Папка с файлами	
VCRedist_x86	04.08.2016 11:49	Папка с файлами	
4700...	04.08.2016 11:49	Файл "GWG"	2 КБ
Autorun	14.09.2009 23:37	Сведения для уст...	1 КБ
leame	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
leesmij	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
leggimi	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
leiame	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
liesmich	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	8 КБ
lisezmoi	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
Microsoft.VC80.CRT.manifest	11.07.2009 19:10	Файл "MANIFEST"	2 КБ
msvcm80.dll	12.07.2009 1:55	Расширение при...	468 КБ
msvcp80.dll	12.07.2009 1:55	Расширение при...	542 КБ
msvcr80.dll	12.07.2009 1:55	Расширение при...	618 КБ
QHiLib-1.7.dll	14.09.2009 23:13	Расширение при...	88 КБ
qt-mt335.dll	13.08.2009 12:08	Расширение при...	4 776 КБ
readme	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	7 КБ
readme_jp	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	12 КБ
readme_kor	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	11 КБ
readme_rus	14.09.2009 23:06	Текстовый докум...	18 КБ
Setup	14.09.2009 23:35	Приложение	648 КБ
ui_de.qm	14.09.2009 23:35	Файл "QM"	38 КБ
ui_en.qm	14.09.2009 23:35	Файл "QM"	16 КБ
ui_es.qm	14.09.2009 23:35	Файл "QM"	37 КБ
ui_fr.qm	14.09.2009 23:35	Файл "QM"	39 КБ
ui_it.qm	14.09.2009 23:35	Файл "QM"	38 КБ

Элементов: 43 Выбран 1 элемент: 648 КБ

Дата создания: 04.08.2016 12:09, Размер: 648 КБ

Компьютер

GALAXIS

GALILEOS Viewer

SICAT. Implant Planning
Surgical Guides

sirona

Запуск интерфейса пользователя...